

R (CHAO

SOLUCIONES FUNERARIAS

7604000 CAMILLA-SILLA QRM Naranja

CAMILLA-SILLA PLEGABLE
DE RESCATE
EMERGENCY FOLDING STRETCHER



Manual de instrucciones
Por favor lea estas instrucciones de uso detenidamente antes
de usar la camilla-silla y guárdelas para futuras consultas.

RAMÓN CHAO,S.L.
Ctra. Nacional 332, km 191.
03740 Gata de Gorgos
Alicante - SPAIN

T.+(34) 96 575 75 36
ventas@ramonchao.com
ramonchao.com

Contenidos:

1. Introducción
2. Ámbito de uso
3. Características
4. Ficha técnica
5. Manual de uso
6. Advertencias
7. Mantenimiento
8. Almacenamiento
9. Embalaje y accesorios

1. Introducción

Por favor, lea atentamente este manual, ya que proporciona información importante sobre el uso seguro y los procedimientos de mantenimiento. La descripción y las imágenes en el manual no son vinculantes., el fabricante tiene el derecho de modificarlas en cualquier momento con el propósito de mejorar la información para aumentar su calidad. Las imágenes del manual son solo un ejemplo ya que el producto puede haber sido mejorado.

2. Ámbito de uso:

La camilla es apta para su uso en hospitales, entornos deportivos, ambulancias y entornos bélicos para transportar a personas heridas en situaciones de emergencia.

3. Características:

Se trata de una camilla-silla con estructura plegable de volumen pequeño cuando está plegada.

Cuenta con dos ruedas y dos patas plegables.

Puede plegarse para su uso como asiento.

Está equipada con cinchas de seguridad para garantizar la seguridad de los pacientes en el proceso de transporte.

Está fabricada con aleación de aluminio de alta resistencia y materiales de piel Oxford. Se caracteriza por ser de peso ligero, tamaño pequeño, fácil de transportar, uso seguro y fácil esterilización.


Fácil almacenaje para ahorro de espacio una vez utilizada.

4. Ficha técnica:

Model	YDC-1A12
Medidas desplegada	190x58x20 cm
Medidas plegada	105x55x20 cm
Peso de la silla	5 kg
Peso que soporta	159 kg

5. Manual de uso:

Para realizar la transferencia del paciente, abra la camilla en primer lugar y, seguidamente, presione el botón de posición, extraiga las ruedas y las patas para apoyarlas, tal y como se muestra en las imágenes 1, 2 y 3.

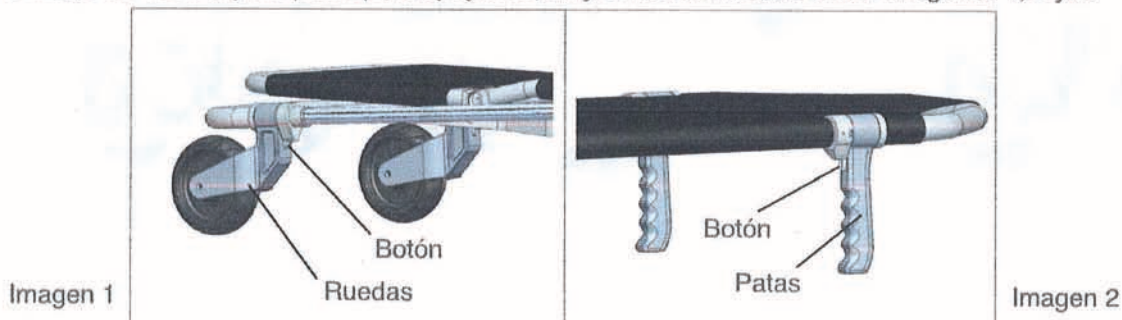

Coloque al paciente sobre la camilla y ajuste las cinchas de seguridad.
Para establecer la camilla en posición de asiento, ábrala primero y después dóblela a la posición mostrada en la imagen 4.
Después su uso, vuelva a poner la camilla en su posición plana, pise la barra inferior y empújela sujetándola por las patas de apoyo.

ESP

Imagen 5



Imagen 4



La posición de almacenamiento se indica en la imagen 5.

6. Advertencias:

Si la superficie de la camilla presenta daños, deberá ser remplazada.
Las cinchas de seguridad deben usarse para prevenir daños a los pacientes.

7. Mantenimiento

Realice la limpieza y la desinfección de la camilla de forma rutinaria.
Compruebe el estado de las cinchas de seguridad después de cada uso. Si las cinchas presentan daños, es necesario reemplazarlas. Compruebe los tornillos y ajústelos si es necesario.
Añada aceite a las partes giratorias y conexiones de la camilla si no se mueven con libertad.

8. Almacenamiento:

Guarde la camilla en un entorno limpio sin humedades y sin peligro de corrosión.

9. Embalaje y accesorios:

Bolsa de nylon y envase de cartón
Se adjunta manual de uso.

Garantía limitada/Garantía:

Ramón Chao, S.L. le ofrece la garantía que establece la ley contra todo defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Deberá por tanto conservar la factura o documento de adquisición.
En caso de utilizar repuestos no originales o modificar el producto se anulará inmediatamente.
El uso indebido o desgaste del producto no se considera como un defecto de fabricación y por tanto no se incluirá en la garantía.
Tampoco se incluye un mal desembalaje de la camilla como por ejemplo cortes realizados con cúter o causas fortuitas.
Para cualquier asunto relacionado con la garantía póngase en contacto con su proveedor.

R CHAO
SOLUCIONES FUNERARIAS