

Desinfección

DESINFECCIÓN INSTANTÁNEA DE SUPERFICIES POR PULVERIZACIÓN DIRECTA

Desinfectante instantaneo bactericida, fungicida y virucida que se aplica por pulverización.

Su composición alcohólica favorece una rápida evaporación. Sin aldehídos.

DISPONIBLE EN VERSIÓN ESTÉRIL CON PISTOLA PULVERIZADORA ESTÉRIL EN EL INTERIOR DEL DOBLE EMBOLSADO.



CR-36 spray
Desinfectante spray
6344000 750 ml

Composición:

Formulación sinérgica alcohólica con agentes de acción prolongada:

- 0,0675% triclosán
- 0,01875 bronopol
- 0,1% cloruro de benzalconio
- 41% isopropanol
- Disolvente
- Perfume

Dosis:

Se aplica puro por pulverización directa sobre las superficies

Aplicación:

Desinfección instantánea de superficies y fómites en zonas de alto riesgo infeccioso. Dejar actuar durante **5-15 minutos**.

Usos en:

- Hospitales: superficies críticas
- Clínicas dentales, consultas, clínicas: superficies críticas
- Laboratorios clínicos y farmacéuticos
- Superficies críticas que requieren una rápida desinfección
- Ambulancias



Ficha Técnica

BACTERICIDA-FUNGICIDA-VIRUCIDA

Eficacia:

NF-T 72-151: Bactericida (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*).

NF-T 72-190: Bactericida y fungicida (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecium*, *Aspergillus niger*).

NF-T 72-301: Bactericida (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Lactobacillus plantarum*)

UNE-EN 13697: Bactericida/fungicida (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans*)

UNE-EN 14476: Virucida (*Adenovirus*, *Poliovirus*)

Características químico-físicas:

- Forma: líquido
- Color: incoloro
- Olor: fresco-cítrico
- Densidad: $0,89 \pm 0,06$ (20°C)
- pH: $3 \pm 0,5$ (20°C)

Registro:

AEMPS 40-DES

Precauciones

- **Evitar que el producto entre en contacto con superficies de metacrilato.**
- **No pulverizar sobre llamas o fuentes de ignición.**

Presentaciones:

750cc con pistola pulverizadora

1 Litro (con pistola pulverizadora opcional)

5 litros (lanza pulverizadora opcional)

Envase 1 litro estéril con pistola pulverizadora estéril en el interior de la doble bolsa.