



Darodor PAA CONCENTRADO Esporicida Instrumental

6343000

COMPOSICIÓN

Solución A (125ml): 5% Ácido Peracético, 21%

Peróxido de Hidrógeno.

Solución B (125ml): Hidróxido sódico, tensioactivos
no iónicos, inhibidores de corrosión y excipientes
c.s.p. 100%.

USO

DARODOR PAA es un desinfectante concentrado
de alto nivel indicado para la desinfección manual
de productos sanitarios invasivos tales como
endoscopios, material médico-quirúrgico o material
termosensible.

Espectro completo de eficacia:

5 MINUTOS

PROPIEDADES

- Pack dúo indivisible: Sistema bicomponente de fácil uso. No requiere activación.
- Desinfectante de alto nivel de rápida acción biocida: Espectro completo de eficacia acreditado en tan solo 5 minutos.
- Estabilidad de la solución de uso: 48h. Verificable mediante tiras de control de ácido peracético.
- Alta compatibilidad con materiales de productos sanitarios invasivos.

EFICACIA

	NORMAS	TIEMPO
BACTERICIDA	EN 14561	
FUNGICIDA	EN 14562	
MICOBACTERICIDA	EN 14563	5 min
VIRUCIDA	EN 14476	
ESPORICIDA	EN 13704	

MODO DE EMPLEO

1. Verter el contenido de las soluciones A y B de **DARODOR PAA** en la cantidad de agua necesaria y homogeneizar.

CUBETA 5L	CUBETA 10L
1 PACK DUO*	2 PACKS DUO
	

* 1 PACK DUO PERMITE PREPARAR 5L DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE

2. Sumergir el producto sanitario a desinfectar previamente lavado.
3. Esperar 5 minutos para la desinfección de alto nivel.
4. Una vez finalizado el tiempo de contacto, extraer el material y aclararlo con agua estéril.

La solución desinfectante se mantiene estable en la cubeta de desinfección durante un periodo de 48h.

PRESENTACIÓN

Caja de 16 packs dúo.

1 pack dúo: Solución A (125ml) + Solución B (125 ml)

Tiras de control, 100 unidades por envase (se adquieren por separado, no incluidas con el producto).

